



Догляд порт-систем та перев'язка

Вимоги


Пов'язка повинна бути стерильною, прозорою і напівпроникною

- Для захисту порт-системи від патогенів
- Для полегшення контролю місця проколу
- Щоб дозволити одночасну заміну голки та перев'язку (D+7)



Правильне використання

- Продезінфікуйте шкіру 2% хлоргексидином в 70% спирті протягом 30 секунд або 10% повідон-йодом
- Дайте шкірі повністю висохнути перед доступом до порту
- Введіть голку Губера
- Зафіксуйте голку стерильними лейкопластирями
- Накладіть пов'язку, не створюючи **натяжіння шкіри**
- Забезпечте відстеження - наклейте етикетку
- ✗ Не накладайте дві напівпроникні пов'язки одна на одну: це зменшить проникність пов'язки (ризик попадання вологи -> ризик інфікування)

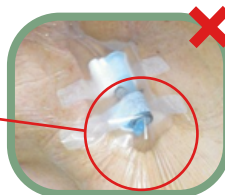

GIFAV - Подовження терміну служби портів: впровадження поточних рекомендацій - квітень 2019 р.
Фото: С. DUPONT

01/2024

Заміна пов'язки

- Якщо прозора пов'язка: кожні 8 діб (D+7)*
- Якщо непрозора: кожні 4 доби (D+3)*
- Видаляється обережним розтягуванням з обох сторін паралельно шкірі
- Якщо пов'язка забруднена або більше не прилягає до шкіри, необхідно якнайшвидше змінити

* D = День введення